



Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia.

terralin® protect płyn

Zalety

- szerokie spektrum bójcze,
- dobra skuteczność w warunkach obciążenia organicznego,
- wysoka wydajność preparatu,
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących,
- wysoka kompatybilność materiałowa,
- bez konieczności spłukiwania,
- do manualnego i maszynowego stosowania,
- stabilność roztworu roboczego przez 30 dni

Obszary zastosowania

terralin® protect służy do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych. Ze względu na nieuciążliwy zapach terralin® protect może być stosowany również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory), tam, gdzie oprócz wysokiej skuteczności niezbędne jest ograniczenie do minimum obciążenia wskutek zapachu.

Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. W celu zwiększenia właściwości myjących możliwość łączenia z preparatem myjącym firmy s&m® Reinigungsadditiv.

Właściwości produktu

terralin® protect jest koncentratem, którego formułę stanowi kombinacja czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Działa bakteriobójczo (również na MRSA), drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, Vaccinia), wirusobójczo wobec adenowirusa, wirusa Polyoma SV40, rotawirusa oraz norowirusa.



Dane produktu

100 g preparatu zawiera : 22 g Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 17 g 2-fenoksietanol, 0,9 g Aminy, N-C12-14(o parzystej liczbie atomów węgla)-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	zielony
pH	ok. 8,6 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	ok. 21 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
Temperatura zapłonu	48 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne

Przepisy dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przewidują obowiązek noszenia rękawic ochronnych podczas obchodzenia się z preparatami dezynfekującymi nie przewidzianymi do stosowania w obrębie skóry.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata.

Roztwory robocze przechowywane w pojemnikach szczelnie zamkniętych w warunkach temperatury pokojowej zachowują trwałość:

- 30 dni - roztwór 2%
- 12 miesięcy - roztwór 0,5%

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
TERRALIN PROTECT płyn 2L FL	5/Karton	181606
TERRALIN PROTECT płyn 5L KA	1/Kanister	181686

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com