



Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu

Desam® Wipes chust.

Zalety

- krótki czas działania,
- nie wymaga spłukiwania,
- gotowy do użycia

Właściwości produktu

desam® wipes są gotowymi do użycia chusteczkami nasączonymi preparatem na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Działają bakteriobójczo (również wobec MRSA), drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, Vaccinia), wirusobójczo wobec norowirusa, rotawirusa, wirusa polio oraz adenowirusa. Rozmiar pojedynczej chusteczki: 13 cm x 22 cm. Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Mocno zanieczyszczone przedmioty i powierzchnie należy najpierw mechanicznie oczyścić. Dezynfekowaną suchą powierzchnię należy dokładnie przetrzeć chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. Dezynfekowana powierzchnia powinna być wilgotna przez czas wymagany do osiągnięcia określonej skuteczności. Po każdorazowym użyciu zamknąć pojemnik. Po wyczerpaniu się zawartości pojemnika można go uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.

CE 1023



Desam[®] Wipes chust.

Dane produktu

Substancje czynne: etanol 450 g/kg, propan-2-ol 300 g/kg, chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC) 5 g/kg

Wskazówki szczególne

Nie stosować na włączone urządzenia elektryczne, w pobliżu otwartego ognia, na powierzchnie gorące itp. Nie stosować do dezynfekcji skóry. Nie stosować na pleksi, szkło organiczne oraz powierzchnie nie odporne na działanie alkoholu. Temperatura magazynowania: od -10 do +25 °C; nie przechowywać bezpośrednio na słońcu. Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desam Wipes chust. doz. 100 ST DS	1/Karton	70000074
Desam Wipes chust. wkł. 100 ST BT	1/Karton	70000075

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz