



Gotowe do użycia chusteczki do mycia
i dezynfekcji powierzchni wyrobów
medycznych wrażliwych na działanie
alkoholu

Desam[®] Wipes Soft chusteczki

Zalety

- krótki czas działania,
- gotowy do użycia,
- nie wymaga aktywacji,

Właściwości produktu

desam[®] wipes soft są gotowymi do użycia chusteczkami do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Działają bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, Vaccinia) oraz bójczo wobec rotawirusa. Mogą być używane do: inkubatorów, ekranów dotykowych, czujników ultradźwiękowych, stetoskopów, aparatów słuchowych, sprzętu do rehabilitacji, itp. Nie wykazują działania drażniącego. Testowane dermatologicznie. Rozmiar pojedynczej chusteczki: 21,5x21,5 cm.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dezynfekowane powierzchnie wyrobów medycznych należy przetrzeć chusteczką. Dezynfekowana powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez czas wymagany do osiągnięcia określonej skuteczności. Po każdorazowym użyciu zamknąć pojemnik. Po wyczerpaniu się zawartości pojemnika można go uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej. Jedna chusteczka wystarczy na powierzchnię 0,36 cm². Podczas opieki nad urządzeniami medycznymi, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.



Desam[®] Wipes Soft

chusteczki

Dane produktu

Substancje czynne:

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 0,2g/kg

poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek

monomeru: 1,5-bis(trimetyleno)guanilguanidyny) 0,5g/kg

chlorek didecyldimetyloamonu 0,5g/kg

Wskazówki szczególne

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed gorącem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +25 °C. Podczas stosowania do urządzeń medycznych, postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desam Wipes Soft chust.doz. 200 ST DS	1/Karton	70000076
Desam Wipes Soft chust.wkl. 200 ST BT	1/Karton	70000077

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz