




AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej
dezynfekcji powierzchni
i nieinwazyjnych
wytrobów medycznych
odpornych na działanie
alkoholi.

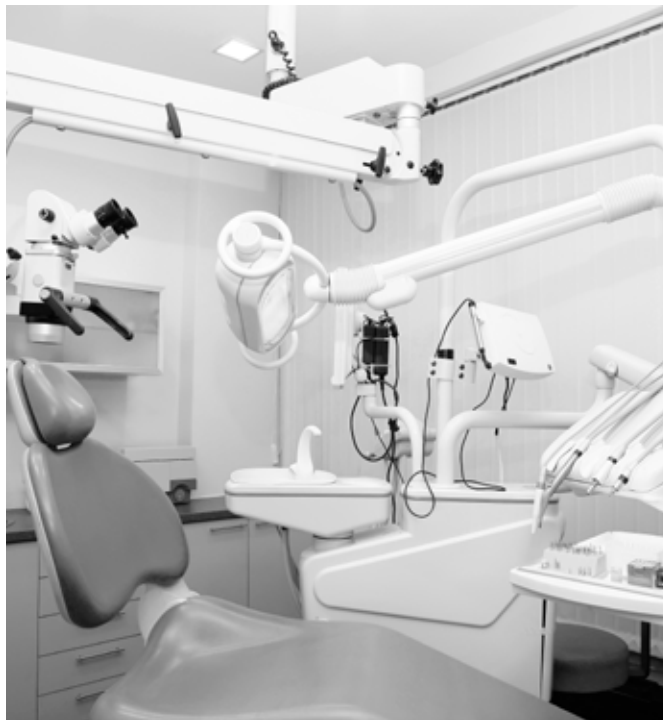

- preparat na bazie alkoholi
- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- przyjemny, delikatny zapach
- błyskawicznie schnie
- nie pozostawia żadnych śladów
- ponad 20 lat na rynku

Preparat gotowy do użycia



Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
nr 7296/18 [Kat. I, gr. 2 i 4].



AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu.

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki
- preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
- charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem
- sprawdzony preparat z 20 letnią historią na rynku polskim

SKŁAD

Substancje czynne: propan-1-ol (Nr CAS: 71-23-8; Nr WE: 200-746-9 - 325 mg/g); etanol (Nr CAS: 64-17-5, Nr WE: 200-578-6-180 mg/g), aldehyd glutarowy (Nr CAS: 111-30-8, Nr WE: 203-856-5 - 1 mg/g)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Polyoma SV 40)
- 60 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Polyoma SV 40, Poliowirus)

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
- Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
- Nanosić na dezynfekowane powierzchnie bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej z odległości 30 cm lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab).



1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 1 minutę.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

OPAKOWANIA

- Aerodesin 2000: butelka 1 litr ze spryskiwaczem
- Aerodesin 2000: kanister – 5 litrów
- Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

WYTWÓRCA: Lysoform GmbH, Niemcy

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok
tel./fax.: 85 747 93 00/01 • www.medilab.pl

